


Alarmsignale), wie in Kapitel 9 der Gebrauchsanweisung beschrieben. Im ersten Schritt entnehmen Sie bitte die Batterie und setzen Sie sie gleich wieder ein, um so einen Selbsttest auszulösen.

- Falls Sie sich unsicher sind, ob die akustische Alarmfunktion der Insulinpumpe einwandfrei funktioniert, können Sie immer durch Drücken einer Taste ein akustisches Signal auslösen (bitte stellen Sie sicher, dass das akustische Tastenfeedback in der Insulinpumpe aktiviert ist).
- Bitte prüfen Sie während des Tages sowie vor dem Schlafengehen die Insulinpumpe und das Display des Diabetes Managers routinemäßig auf Benachrichtigungen.
- Falls Sie eine E7 Fehlermeldung auf der Insulinpumpe erhalten, folgen Sie bitte den wichtigen Anweisungen gemäß der Gebrauchsanweisung:

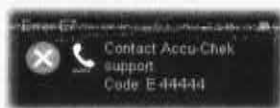

Elektronikfehler:

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn diese Meldung erscheint. Wird die Meldung im Anschluss weiterhin ausgegeben, können Sie das Problem nicht selbst beheben. Hinweise zur Fehlerbehebung erhalten Sie vom Accu-Chek Kunden Service Center (siehe innere Umschlagseite am Ende). Wechseln Sie zu einer alternativen Insulintherapie.

- Sofern Sie weiterhin diese Benachrichtigung sehen, kontaktieren Sie bitte unseren Accu-Chek Kunden Service Center um die Insulinpumpe auszutauschen.

Das Problem betrifft ausschließlich das Accu-Chek Insight System. Aufgrund der unterschiedlichen Designs und elektronischen Bestandteile sind alle anderen Accu-Chek Insulinpumpen nicht von diesem Problem betroffen. Die zuständige Behörde, das medizinische Fachpersonal und alle Diabetesfachhändler sind informiert.

Sollten Sie zusätzliche Unterstützung im Umgang mit dem Accu-Chek Insight Insulinpumpensystem benötigen oder weitere Fragen haben, so stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen des Accu-Chek Kunden Service Center unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4466800 (Mo-Fr, 08:00–18:00 Uhr) oder per E-Mail unter kundenservice@accu-chek.de jederzeit gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen aus Mannheim

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH



Geschäftsführer

i.V.



Dr. Bertram Fischer
Leiter Quality EMEA/LATAM