




## mylife YpsoPump Warnhinweise und Alarme

### Warnhinweise



Ampullenfüllstand niedrig

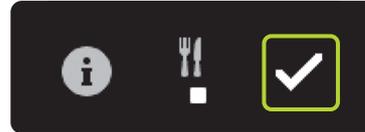


Bolus abgebrochen




Batterieladung niedrig



Temporäre Basalratenfunktion  
abgebrochen

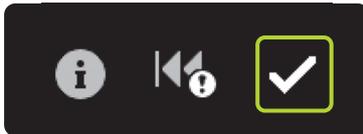

Zurückfahren der Gewindestange  
nicht abgeschlossen

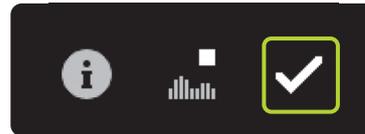

Insulinpumpe gestoppt



Füllvorgang nicht abgeschlossen



Bluetooth®-Verbindung fehlgeschlagen



- Die Warnhinweise führen zu keinem Abbruch der Insulinabgabe.
- Die Warnhinweise erscheinen auf dem Status-Screen und müssen bestätigt werden.
- Warnhinweise werden primär taktil und akustisch in 4 Eskalationsstufen signalisiert. Die Stufen eskalieren im Abstand von 30 Minuten.

Eskalationsstufen für Warnhinweise:

Stufe 1: Taktil

Stufe 2: Taktils und schwaches akustisches Signal


Stufe 3: Taktils und mittleres akustisches Signal

Stufe 4: Taktils und starkes akustisches Signal

**Alarmer**



Keine Batterie

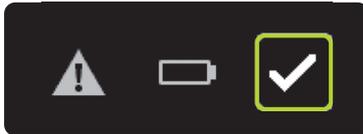

Batterie leer




Batterie nicht geeignet



Kein Insulin




Ampulle leer

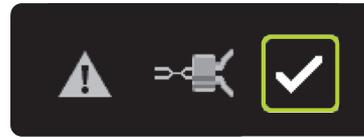

Okklusion



Internen Akku laden

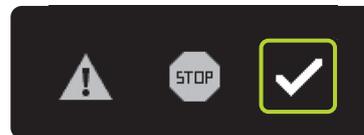

Auto-Stopp



**Elektronikfehler**

Schritt 1: Koppeln Sie das Infusionsset vom Körper ab und entfernen Sie die Alkaline-Batterie aus dem Batteriefach.



**Elektronikfehler**

Schritt 2: Drücken Sie die Funktionstaste für 2 Sekunden. Um die Insulinpumpe erneut in Betrieb zu nehmen, führen Sie die Schritte auf Seite 37 des Benutzerhandbuchs durch und überprüfen Sie Ihre Therapieeinstellungen. Wechseln Sie die Ampulle und das Infusionsset gemäss den Schritten auf Seite 95 im Benutzerhandbuch.



**Alarmer führen in jedem Fall zu einem Abbruch der Insulinabgabe.**

- Die Alarmer erscheinen auf dem Status-Screen und müssen bestätigt und behoben werden.
- Die Alarmer werden primär taktil und akustisch in 4 Eskalationsstufen signalisiert. Die Stufen eskalieren im Abstand von 5 Minuten. Wird ein Alarm bestätigt, aber nicht behoben, wird er nach 30 Minuten wieder akustisch und taktil signalisiert.

Eskalationsstufen für Alarmer:

- Stufe 1: Taktil
- Stufe 2: Taktil und schwaches akustisches Signal
- Stufe 3: Taktil und mittleres akustisches Signal
- Stufe 4: Taktil und starkes akustisches Signal

**Disclaimers:** mylife und Ypsomed Pump sind registrierte Handelsmarken von Ypsomed AG. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die -Logos sind registrierte Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc., und jeder Gebrauch solcher Marken durch Ypsomed ist unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. // Der Inhalt wird ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keinen Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Therapie dar. Holen Sie stets den Rat Ihres Arztes oder eines anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleisters ein.