

5.1 Silent Mode aktivieren



1) Drücken Sie im **HAUPT-MENÜ** die drei Tasten  ,  ,  gleichzeitig.



2) Die Pumpe wird ein **PASSWORT** verlangen, geben Sie **1013** in der Reihenfolge **3→1→0→1** ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis Sie müssen zuerst an der vierten Stelle beginnen und die Zahl **3** eingeben. Danach bitte auf  drücken, um auf die erste Stelle zu wechseln usw. Abschließend an der dritten Stelle die Zahl 1 eingeben und mit der **OK**-Taste bestätigen.



3) Es erscheint:
Engineer Mode PW



4) Drücken Sie **erneut** die drei Tasten , ,  gleichzeitig.




5) Die Pumpe wird ein weiteres PASSWORT verlangen, geben Sie **1231** in der Reihenfolge **1→1→2→3** ein und drücken **OK**.

Hinweis Sie müssen zuerst an der vierten Stelle beginnen und die Zahl **1** eingeben.

Danach bitte auf  drücken, um auf die erste Stelle zu wechseln usw.

Abschließend an der dritten Stelle die Zahl 3 eingeben und mit der **OK**-Taste bestätigen.

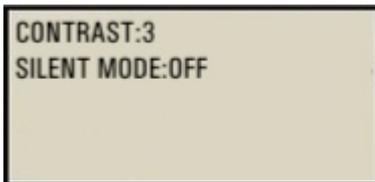

6) Es erscheint ein weiteres Menü

CONTRAST:3 (1-7)
SILENT MODE: OFF (ON, OFF, BEEP)

Für den Silent Mode die Funktion einschalten, und im Anwender Menü unter Punkt 4.ALARM auf Töne einstellen.